




bobo motion 2.0

Benutzerhandbuch

Sep 2023



App herunterladen

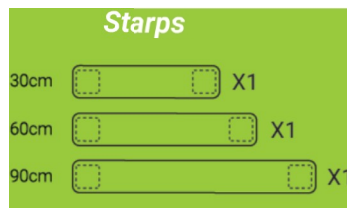

Laden Sie die Bobo Pro 2.0 App bei Google Play oder im App Store herunter.

Registrieren Sie sich in der App. Bitte beachten Sie, dass die E-Mail, die Sie für die Registrierung verwenden, die Adresse ist, an die alle Berichte gesendet werden.

Geben Sie Ihren Produktaktivierungscode ein. Sie können diesen auf der Rückseite des Sensor einsehen.


Stellen Sie sicher, dass Ihre Bluetooth- und Ortungseinstellungen aktiviert sind. und gewähren Sie alle von der App angeforderten Berechtigungen.

Um den Bewegungssensor einzuschalten, drücken Sie kurz die Einschalttaste.

Befolgen Sie die Anweisungen der App, um die Klettverschlüsse richtig an Ihrem Körper anzubringen.

So tauschen Sie die Batterie aus:

1. Schrauben Sie die Sicherungsschraube heraus.
2. Ziehen Sie das Batteriefach in Pfeilrichtung.
3. Setzen Sie eine neue Batterie CR2032 3V ein.
4. Schließen Sie die Schublade und ziehen Sie die
5. Schraube wieder an.

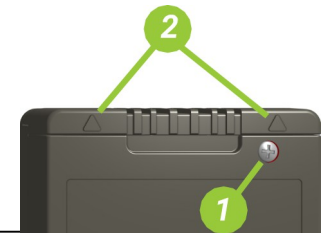

Einschalten/Ausschalten	Spezifikationen
<ul style="list-style-type: none"> Einschalten: kurz drücken Blau -> Orange Suchmodus Blau blinkend Verbunden Grün blinkend Ausschalten - langes Drücken Warten auf 2 rote Blinkzeichen 	<p>Drahtlose Verbindung zu Tablets und Smartphones LED- und Audioanzeigen Sensoren: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, Gyroskop Betriebstemperatur: -5°C bis 45 °C (23 °F bis 113 °F) Batterietyp: Münze CR2032 3V - nicht wiederaufladbar Batterielebensdauer: Ca. 400 Stunden bei kontinuierlicher Nutzung Kommunikationsmodul: Bluetooth Low Energy (BLE)</p> <p>BO&BO GmbH / info@bobo-balance.com +1 888-300-3153 Manufactured in China E.A.R. - Obelis S.A. Boulevard General_Wahis 53, B-1030 Brussels, BELGIUM.</p>

CE

"Batterie nicht verschlucken, Verätzungsgefahr"

Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

