
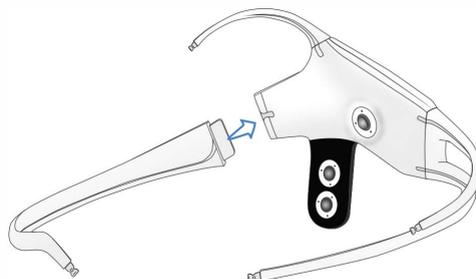


QUICK START GUIDE

1 Den hinteren Arm am Helm befestigen.

Bringen Sie den Anschluss des hinteren Arms am Gehäuse des Headsets an. Der Anschluss sollte vollständig in den Schlitz gleiten und der Arm sollte mit dem Gehäuse bündig sein.

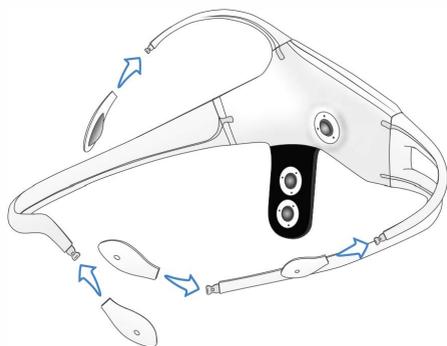

2

Befestigen Sie die Sensoren am Headset.

Bringen Sie einen Sensor am Ende jedes Arms an, wobei die Sensorflächen nach innen zeigen. Die Sensoren sollten einrasten und mit dem Arm bündig sein.

Aufladen des Insights: Laden Sie das Insight mit dem mitgelieferten Kabel auf. Das Insight ist in etwa 2 Stunden voll aufgeladen.

Ein- und Ausschalten des Insight: Die EIN/AUS-Taste des Insights befindet sich über dem Ladeanschluss.

3 Positionieren Sie das Headset richtig.

Positionieren Sie die Referenzsensoren so, dass sie die Haut hinter dem Ohr berühren. Es ist wichtig, dass die Referenzsensoren die Haut hinter dem Ohr berühren. Falls erforderlich, biegen Sie den Arm des Referenzsensors vorsichtig, damit die Sensoren die Haut berühren. Die Frontsensoren sollten über jedem Auge ausgerichtet und etwa drei Fingerbreit über den Augenbrauen positioniert sein. Falls erforderlich, befeuchten Sie die Pads erneut mit der Rehydrationslösung.

