

EmotivPRO v3.0

Installieren Sie EmotivPRO auf Ihrem PC oder Mac

EmotivPRO auf einem Windows-PC installieren

1. Gehen Sie zu www.emotiv.com
2. Melden Sie sich bei Ihrer Emotiv-ID an, indem Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Anmelden“ klicken.
3. Gehen Sie zum Dropdown-Menü „Mein Konto“ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und klicken Sie auf Downloads.
4. Suchen Sie Emotiv-Installer-Win in der Liste der verfügbaren Downloads und klicken Sie auf „Herunterladen“.
Schaltfläche daneben.
5. Öffnen Sie die heruntergeladene Emotiv-Installer-Win-x64.exe .
Installieren Sie EmotivPRO unter Verwendung des Standardpfads C:\Programme (x86) oder geben Sie einen anderen Pfad an. Klicken Sie auf Weiter.
7. Wählen Sie EmotivPRO aus der Anwendungsliste aus.
. Akzeptieren Sie die Benutzerlizenzvereinbarung und klicken Sie auf Weiter
9. Das Installationsprogramm lädt EmotivPRO herunter
10. Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf „Schließen“, um das Installationsprogramm zu beenden.

EmotivPRO auf einem Mac installieren

1. Gehen Sie zu www.emotiv.com
2. Melden Sie sich bei Ihrer Emotiv-ID an, indem Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Anmelden“ klicken.
3. Gehen Sie zum Dropdown-Menü „Mein Konto“ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und klicken Sie auf Downloads.
4. Suchen Sie Emotiv-Installer-Mac in der Liste der verfügbaren Downloads und klicken Sie auf „Herunterladen“.
Schaltfläche daneben.
5. Öffnen Sie die heruntergeladene Emotiv-Installer-Mac.dmg .
Installieren Sie EmotivPRO unter dem Standardpfad Benutzer/Anwendungen/EmotivApps oder geben Sie einen an anderer Weg. Klicken Sie auf Weiter.
7. Wählen Sie EmotivPRO aus der Anwendungsliste aus.
. Akzeptieren Sie die Benutzerlizenzvereinbarung und klicken Sie auf Weiter
9. Das Installationsprogramm lädt EmotivPRO herunter.
10. Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf Schließen, um das Installationsprogramm zu beenden.

Bitte beachten Sie: Ihr Mac fordert Sie möglicherweise auf, die Installation von Apps von nicht identifizierten Entwicklern zuzulassen, um Emotiv Installer auszuführen. Um Emotiv Installer die Berechtigung zur Installation auf Ihrem Mac zu erteilen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Installationsprogramm und wählen Sie „Öffnen“ aus dem Menü. Auf Ihrem Bildschirm wird ein Popup angezeigt, in dem Sie um Erlaubnis zum Öffnen des Emotiv-Installationsprogramms gebeten werden. Klicken Sie auf Öffnen.