

KURZANLEITUNG

MN8



## Contour herunterladen

Verfolgen Sie mit Contour kognitive Leistungsmetriken in Echtzeit.

 GET IT ON **macOS**

 GET IT ON **Windows**

 GET IT ON **App Store**

 GET IT ON **Google Play**

MacOS (11) High Sierra  
oder höher.


Windows 10 (64 Bit)  
v1809 oder höher.

iOS 13 oder höher.

Android 7.0 oder höher.

## Auspacken Ihres MN8


Nehmen Sie die Hülle aus der Schachtel.  
Wenn Sie die Schachtel öffnen, finden Sie  
Folgendes:

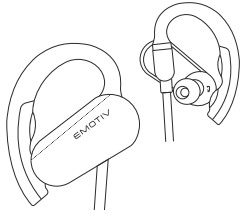


MN8 Ohrhörer




MN8 Reiseetui

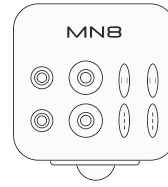


Sensoren- und  
Ohrhörerpaket

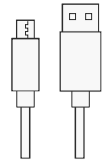


USB-C-Ladekabel

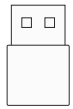

Bluetooth-Dongle

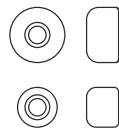

Zwei Ohrhörergrößen

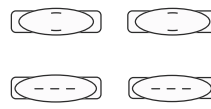

Zwei Sensortypen






Werkzeug zum  
Entfernen von Sensoren

## SCHRITT 1

# Ersetzen Sie Ihre Sensoren

Wir haben neue MN8-Sensoren für verbesserten Komfort und Kontakt mit Ihren Ohren hinzugefügt. Bitte ersetzen Sie die Sensoren für ein besseres Erlebnis.

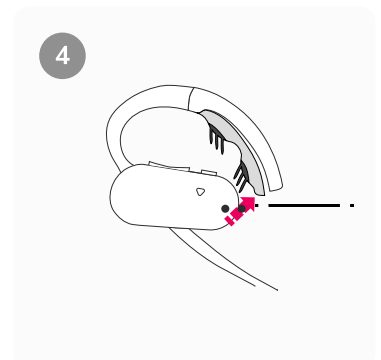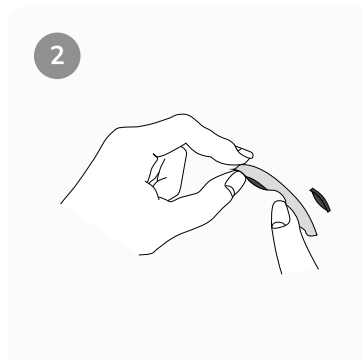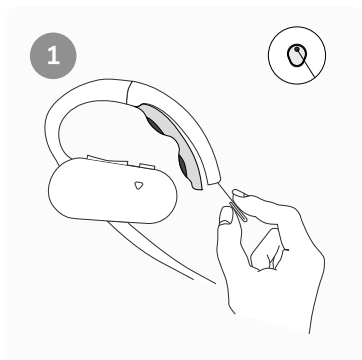


Führen Sie die Spitze des Sensorentfernungswerkzeugs in die kleine runde Öffnung am Ende des Ohrbügels ein. Drücken Sie dann vorsichtig nach oben, bis Sie ein Klicken hören.

Drücken Sie die Sensoren nach oben, um sie zu entfernen.

Setzen Sie die neuen Sensoren ein und achten Sie dabei darauf, dass beide nach unten zeigen.

Schieben Sie das Sensorpad wieder in den Ohrbügel. Sie sollten ein Klicken hören.

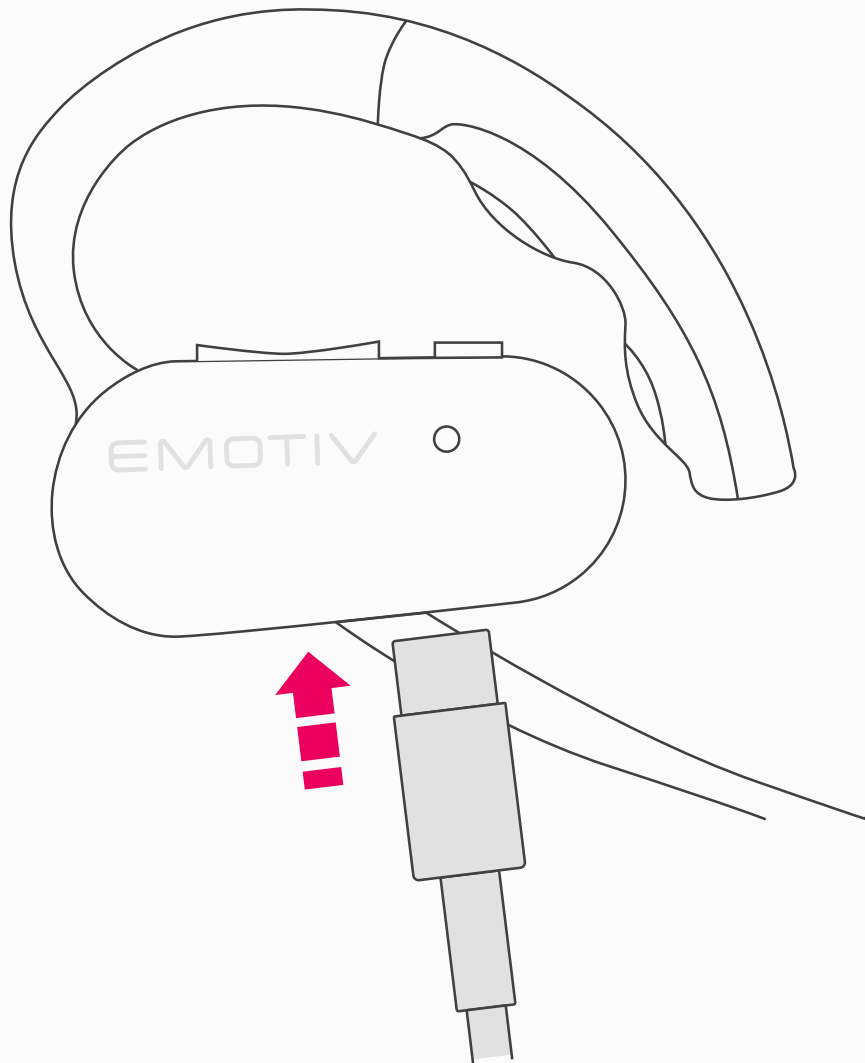

## Aufladen Ihres MN8


MN8 wird vor dem Versand aufgeladen und getestet – Sie können es also sofort verwenden.

Um MN8 aufzuladen, gehen Sie wie folgt vor:

- Schließen Sie MN8 mithilfe des Ladekabels (mitgeliefert) und eines USB-Netzteils (nicht mitgeliefert) an eine Steckdose an.
- Das vollständige Aufladen des MN8 kann bis zu zwei Stunden dauern.
- Während des Ladevorgangs von MN8 leuchtet die LED rot. Wenn MN8 vollständig geladen ist, leuchtet die LED grün.

### *Ladetipps*

- *Um die Nutzung von MN8 zu maximieren, empfehlen wir, es vor der Verwendung vollständig aufzuladen.*
- *Wenn die LED beim Drücken der Einschalttaste nicht blinkt, muss Ihr MN8 aufgeladen werden.*
- *MN8 schaltet sich beim Laden nicht ein. Dies ist eine Sicherheitsfunktion, um einen Stromschlag zu verhindern.*
- *Laden Sie MN8 nicht auf, wenn es in Gebrauch ist.*

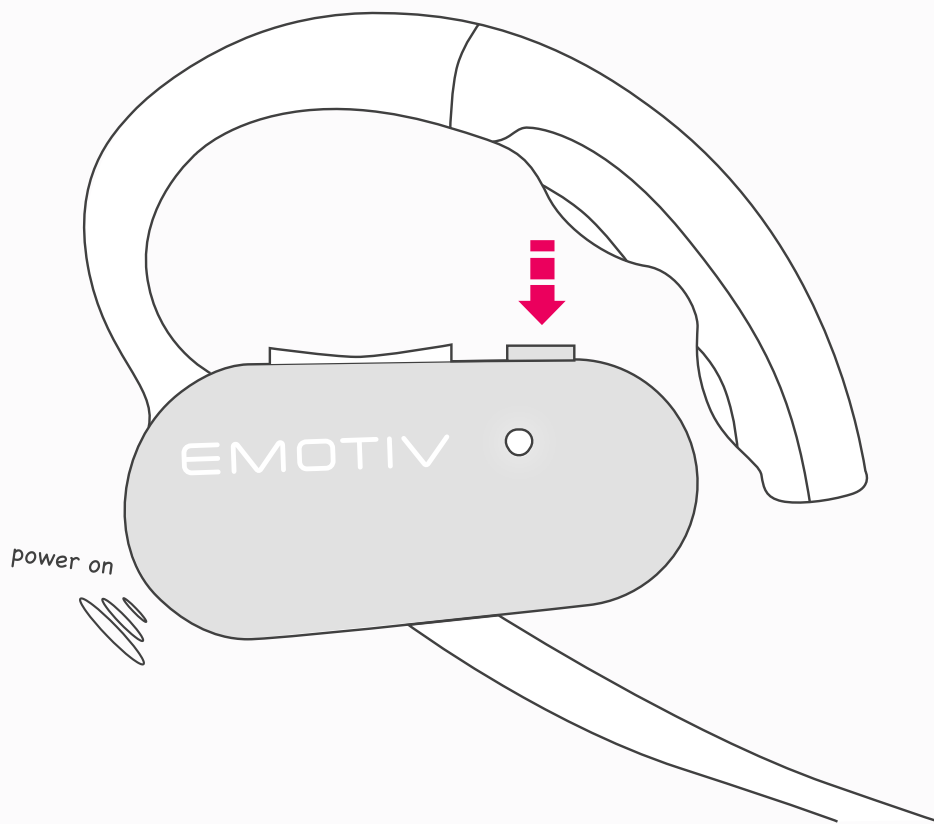

### SCHRITT 3


## Ein- und Ausschalten Ihres MN8

### MN8 einschalten

Um MN8 einzuschalten, halten Sie den Einschaltknopf zwei Sekunden lang gedrückt. Die LED blinkt und Sie hören eine Audioansage mit der Meldung „Einschalten“.

### MN8 ausschalten

Um MN8 auszuschalten, halten Sie den Einschaltknopf fünf Sekunden lang gedrückt. Sie hören eine Audioansage mit der Meldung „Ausschalten“ und die LED erlischt.

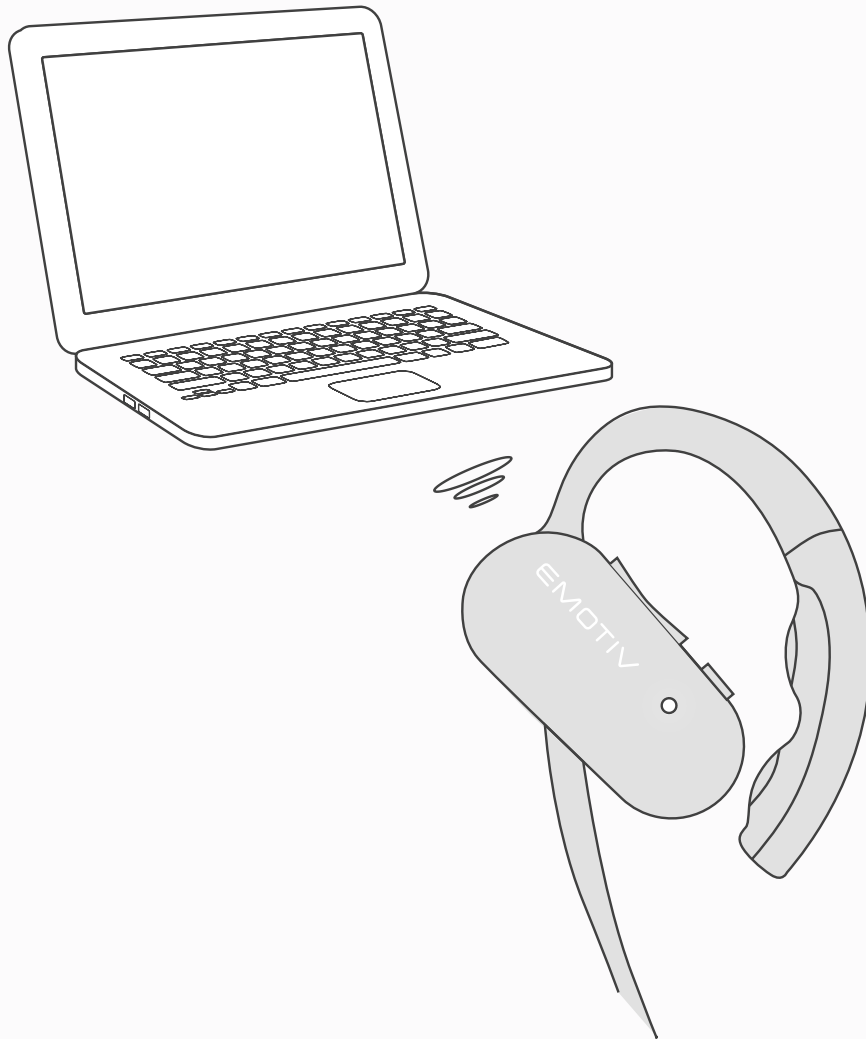

#### SCHRITT 4

### **MN8 mit einem Gerät verbinden**

Laden Sie Contour oder EMOTIV Launcher herunter, bevor Sie MN8 zum ersten Mal verwenden.

## Bluetooth-Verbindungen

Wenn Sie MN8 zum ersten Mal einschalten, wechselt es automatisch in den Kopplungsmodus und die LED blinkt rot und blau.


MN8 erfordert zwei Bluetooth-Verbindungen:

- Eine für Daten (Bluetooth Low Energy) und
- Eines für Audio-Streaming (Bluetooth Classic).
- Wir empfehlen, zuerst die Daten und dann das Audio-Streaming zu koppeln.
- Sie können beide Datenströme gleichzeitig oder nacheinander nutzen.


### SCHRITT 5

## Verschraubung MN8


Ihr MN8 sollte bequem sitzen. Es verfügt über verstellbare Ohrbügel, austauschbare Sensoren und Ohrstöpsel in verschiedenen Größen, um einen bequemen Sitz zu gewährleisten.

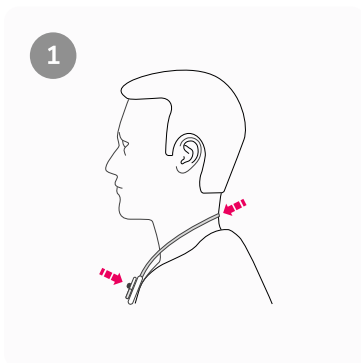


Platzieren Sie Ihr MN8 über Ihrem Hals, sodass die Kapsel auf Ihren Schultern liegt.

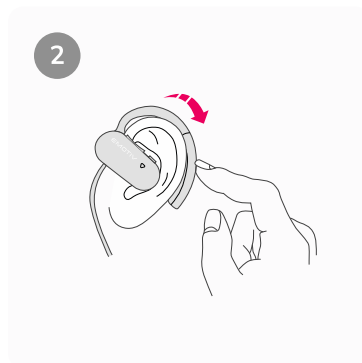


Nehmen Sie die linke Kapsel und führen Sie den Ohrbügel über Ihr Ohr.

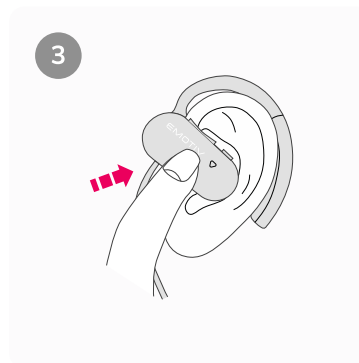

Drücken Sie die Ohrstöpsel in Ihren Gehörgang und achten und achten Sie darauf, dass sie bequem, aber fest sitzen. Beide Wölbungen im Ohrbügel sollten die Rückseite Ihres Ohrspeicheldrüsens bedecken.

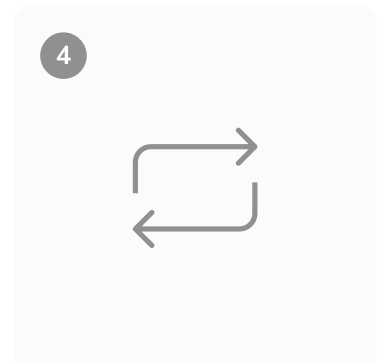

Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für Ihr rechtes Ohr.

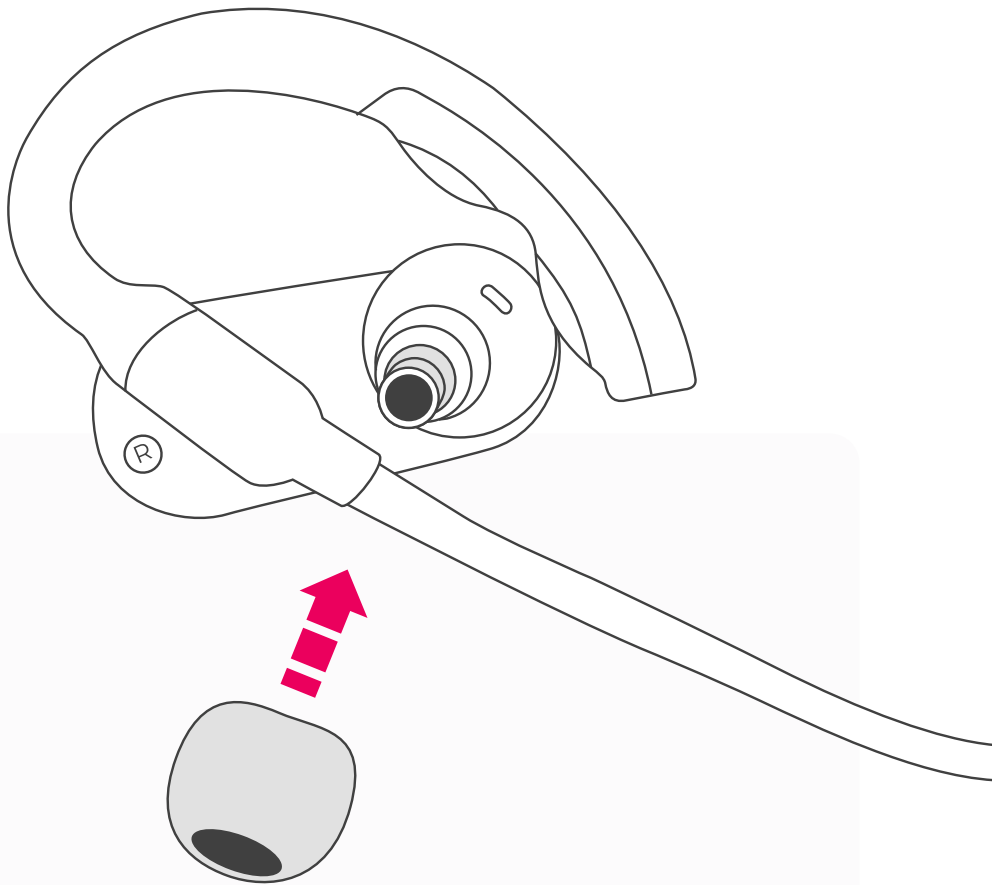

#### SCHRITT 6

### Wechseln der Ohrstöpsel


MN8 wird mit mittelgroßen Ohrstöpseln geliefert. Zwei weitere Größen finden Sie im Sensors & Earbuds-Paket.

So wechseln Sie die Ohrstöpsel:

1. Entfernen Sie die montierten Ohrstöpsel, indem Sie sie von den Metallkanalsensoren abziehen.
2. Nach dem Entfernen können Sie die neuen Ohrstöpsel anbringen, indem Sie sie auf die Metallkanalsensoren drücken.

Aufgrund der sensiblen Natur von EEG-Aufzeichnungen sollten die Ohrstöpsel sehr eng in Ihren Ohren sitzen (keine Lücken). Im Zweifelsfall wählen Sie die größere Größe.



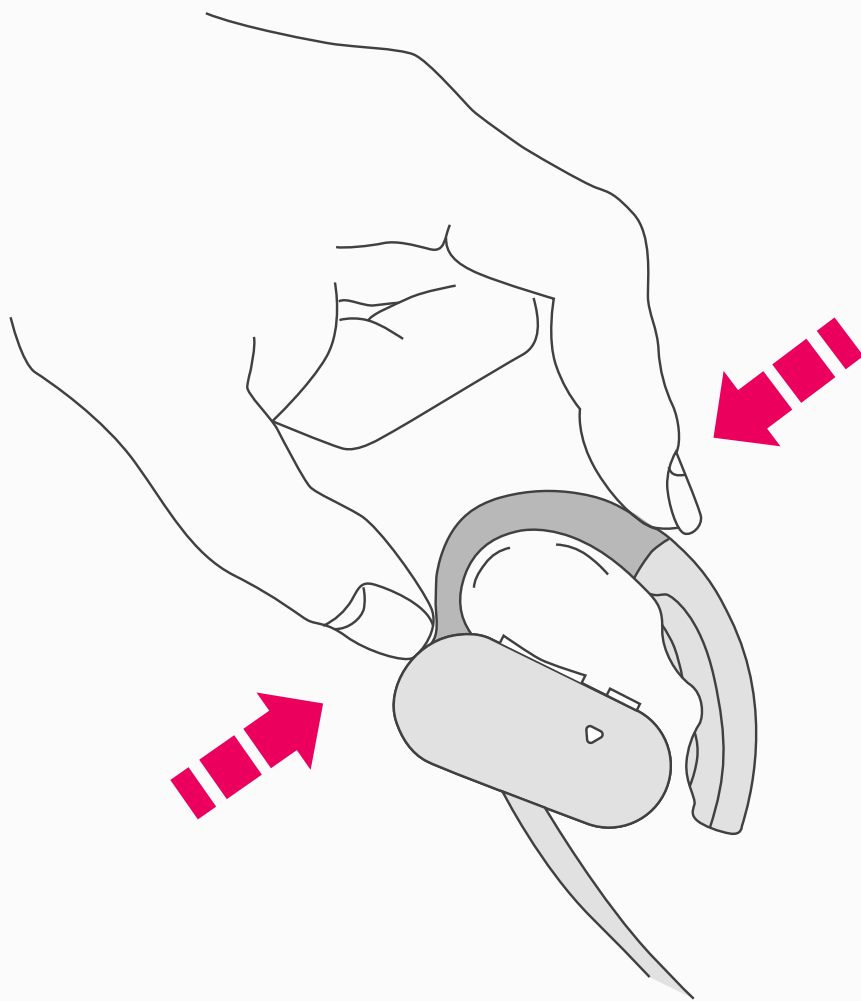

#### SCHRITT 7

### **Anpassen des Ohrbügels**

Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Ohrbügel zu eng oder zu locker um Ihr Ohr sitzen, können Sie sie durch leichtes Drücken oder Ziehen anpassen. Wenden Sie dabei nicht zu viel Kraft an, da dies den Ohrbügel beschädigen könnte.

Weitere Hilfe zur Verwendung von EMOTIV MN8 erhalten Sie  
im Handbuch oder beim Kundendienst.

**[Zum Handbuch\(https://emotiv.gitbook.io/mn8-user-manual/\)](https://emotiv.gitbook.io/mn8-user-manual/)**