## Batteriewechsel AliveCor KardiaMobile 6L



#### 1. Schritt

Drehen Sie Ihr Kardia Mobile 6L auf die Rückseite.

#### 2. Schritt

Für den Batteriewechsel benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher der Kategorie Uhrmacherwerkzeug sowie einen kleinen Schlitzschraubenzieher für das Entfernen der Batterie. Öffnen Sie Ihr KardiaMobile 6L vorsichtig mit dem Kreuzschlitzschraubendreher.



#### 3. Schritt



Sie benötigen die Batterie CR2016, beispielsweise VARTA Knopfzelle CR2016 3,0.

Entfernen Sie die Batterie vorsichtig an der Einkerbung auf der linken Seite des Batteriefaches mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher.

### 4. Schritt

Setzen Sie die neue Batterie unter dem rechten Gehäuseeinschub wieder ein und verschrauben Sie das Gehäuse mit der Abdeckung. Bitte entsorgen Sie die Batterie vorschriftsgemäß.



# Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem KardiaMobile 6L!



Bei Fragen können Sie uns telefonisch erreichen: 06403-60993-51