



# Gebrauchsanweisung

Modius™ ist eine revolutionäre neue Careable Technology®, die Ihnen zu einem schlankeren Körper verhilft.

## Warnungen und Vorsichtshinweise:

Die Elektroden-Gelpads gemäß den Anweisungen nur auf den Warzenfortsätzen hinter den Ohren platzieren. Nicht auf der Brust oder an anderen Stellen am Kopf oder Hals platzieren.

Falls unerwartete Reaktionen auftreten, sollte die Verwendung von Modius™ sofort abgebrochen werden.

Dieses Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kleine Artikel wie Elektrodenpads können bei Verschlucken zum Ersticken führen. Es wird empfohlen, dieses Gerät nur im Sitzen oder Liegen zu verwenden. Beim Fahren oder beim Bedienen von Maschinen jeglicher Art nicht verwenden.


Modius™ ist ausschließlich zur Unterstützung von Erwachsenen über 18 Jahren bei einem angestrebten Gewichtsverlust oder einer angestrebten Gewichtskontrolle indiziert.

## Inhalt

1. Modius™ Packung - Inhalt .....	2
2. Los geht's .....	2
3. Verwendung Ihres Modius™ Headsets .....	3
4. Fehlerbehebung .....	6
5. Pflege Ihres Modius™ .....	7
6. Allgemeine Produktinformationen und technische Daten .....	8
7. Hinweise zur Zulassung und Sicherheit .....	10
8. Kontakt .....	13

# 1. Modius™ Packung - Inhalt

## 1. Modius™ Headset

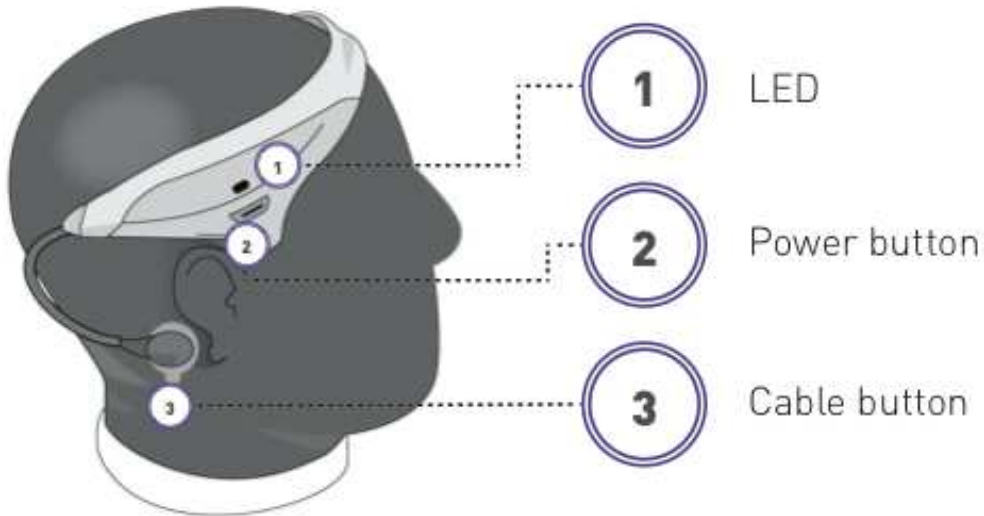

## 2. Modius™ Trageetui

## 3. Modius™ Kurzanleitung und wichtige Sicherheits- und Produktinformationen

## 4. USB-Ladekabel, 100 Elektroden-Gelpads, 100 Alkohol-Reinigungstücher.

Hinweis: Benötigt, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten:

- USB-Anschlussadapter
- Android 5.0 oder höher oder iOS 9 oder höher.

## 2. Los geht's ...

### *Laden Ihres Modius™ Headsets*

- Das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel an einen USB-Anschluss und das Headset anschließen.
- Wenn das Headset erfolgreich geladen wird, leuchtet die LED-Anzeige gelb.
- Wenn das Headset erfolgreich geladen ist, erlischt die LED-Anzeige.
- Wenn Sie das Netzkabel an das Headset anschließen und die LED-Anzeige gelb blinkt, liegt bei dem Gerät ein Ladefehler vor (siehe „Fehlerbehebung“).

HINWEIS: Bitte achten Sie darauf, das Ladekabel zu entfernen, bevor Sie Ihr Headset benutzen.

### *Koppeln Ihres Headsets mit Ihrem Handy*

- Stellen Sie vor Beginn Folgendes sicher:
  - Ihr Headset ist geladen (siehe „Laden Ihres Headsets“) und das Ladekabel wurde entfernt.
  - Das Headset ist eingerichtet: Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste seitlich am Headset über 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie mehrere Pieptöne hören.
  - Auf Ihrem Handy ist die Bluetooth-Drahtlostechnologie aktiviert.

Sie haben die Modius™ App aus dem Apple® App Store oder von Google Play® installiert und den Registrierungsprozess abgeschlossen.

- Bei ausgeschaltetem Headset:
  - o Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste seitlich am Headset 4 Sekunden lang gedrückt.
  - o Sie hören einen langgezogenen Piepton, die Ein-/Ausschalttaste blinkt weiß und die LED-Anzeige blinkt blau, was anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet und bereit zum Koppeln ist.
- Starten Sie die Modius-Geräteapp auf Ihrem Handy. Die App teilt Ihnen mit, dass sie nach Ihrem Headset sucht.
- Wenn sich das Headset mit der App verbindet, hören Sie zwei kurze Pieptöne und die LED-Anzeige blinkt blau. Damit teilt Ihnen das Headset mit, dass Ihr Handy eine Koppelung mit ihm angefordert hat.
- Drücken Sie einmal die Ein-/Ausschalttaste am Headset, um die Koppelung anzunehmen.
- Auf Ihrem Smartphone erhalten Sie die Mitteilung, dass das Headset eine Koppelung mit Ihrem Handy herstellen möchte. Nehmen Sie die Koppelung an.
- Es kann etwa 10 Sekunden dauern, bis die Koppelung abgeschlossen ist.
- Wenn die Koppelung abgeschlossen ist, sollte sich die Benutzeroberfläche der App verändern, sodass Sie Ihr Headset steuern können.

### 3. Verwendung Ihres Modius™ Headsets


#### Empfohlene Verwendungsdauer

Die empfohlene Verwendungsdauer beträgt 45 Minuten bis maximal 1 Stunde pro Tag. Als Sicherheitsfunktion stoppt Modius™ die Stimulation automatisch, wenn Sie es länger als 1 Stunde pro Tag verwenden. Nach 16 Stunden können Sie eine neue Sitzung beginnen, sodass Sie Ihre Verwendungsroutine flexibel gestalten können.

Hinweis: Siehe „Warnungen und Vorsichtshinweise“ für weitere Informationen zur Produktsicherheit.

#### *So tragen Sie Ihr Headset*

- Reinigen Sie mit einem Alkohol-Reinigungstuch die Haut im Bereich der Warzenfortsätze, dem harten, knöchigen Bereich hinter den Ohren.
- Klicken Sie einen Gelpad-Clip in die Enden beider Modius™ Kabel (Kabeltaste).
- Setzen Sie sich Modius™ so auf den Kopf, dass sich die Ein-/Ausschalttaste über dem rechten Ohr befindet.

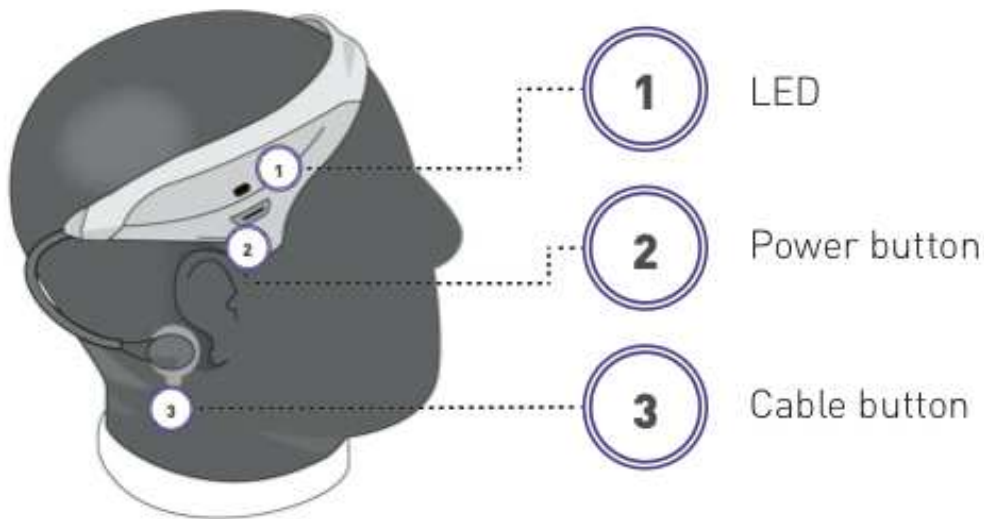

- Entfernen Sie die Schutzabdeckung aus Kunststoff von den Gelpads.
- Streichen Sie alle Haarsträhnen zurück, bevor Sie die Gelpads auf der gereinigten Haut anbringen, da der Klebstoff des Pads an den Haaren festkleben und ziehen kann.

### *Einschalten des Headsets und Beginn einer neuen Sitzung*

- Stellen Sie Folgendes sicher:
  - o Das Headset ist geladen, eingeschaltet und mit Ihrem Handy verbunden.
  - o Das Headset sitzt bequem auf Ihrem Kopf und die Elektroden sind gemäß den Anweisungen angebracht.
- Schalten Sie das Headset an, indem Sie die Ein-Ausschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Sie hören einen hohen Piepton und die LED blinkt.
- Navigieren Sie in der App zur Registerkarte „Dashboard“.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start Session“.
- Wenn Sie 3 kurze hohe Pieptöne hören und die LED-Anzeige mehrmals weiß blinkt, ist Ihre Sitzung zu Ende.

### *Erhöhen der Leistung*

Stellen Sie Folgendes sicher:

- o Das Headset ist eingeschaltet und mit Ihrem Handy verbunden.
- o Das Headset sitzt bequem auf Ihrem Kopf und die Elektroden sind gemäß den Anweisungen angebracht.
- o Sie haben eine Sitzung begonnen.

Navigieren Sie in der Modius™ App zur Registerkarte „Dashboard“.

Klicken Sie auf den blauen Kreis mit einem „+“-Symbol in der Mitte unter Ihrem aktuellen Sitzungsfortschritt. Sie hören einen kurzen hohen Piepton des Headsets.

Die maximale Leistung des Headsets ist 10. Wenn Sie versuchen die Leistung weiter zu erhöhen, hören Sie 2 kurze hohe Pieptöne, die anzeigen, dass die maximale Leistung erreicht ist.

### *Senken der Leistung*

Stellen Sie Folgendes sicher:

- Das Headset ist eingeschaltet und mit Ihrem Handy verbunden.
- Das Headset sitzt bequem auf Ihrem Kopf und die Elektroden sind gemäß den Anweisungen angebracht.
- Sie haben eine Sitzung begonnen.

Navigieren Sie in der App zur Registerkarte „Dashboard“.

Klicken Sie auf den blauen Kreis mit einem „-“-Symbol in der Mitte unter Ihrem aktuellen Sitzungsfortschritt. Sie hören einen kurzen tiefen Piepton des Headsets.

Die minimale Leistung des Headsets ist 1. Wenn Sie versuchen die Leistung weiter zu senken, hören Sie 2 kurze tiefe Pieptöne, die anzeigen, dass das Headset nicht mehr stimuliert und die Leistung auf 0 zurückgefahren ist, was im Prinzip dem Standby-Modus entspricht.

### **Warnung**

- Wenn Sie sich während einer Sitzung unwohl fühlen, halten Sie die Sitzung an und verringern Sie die Intensität, bevor Sie fortfahren. Mögliche Gefahren oder Nebenwirkungen sind unter anderem: Hautreizungen, Unbehagen durch die Stimulation, gestörtes Gleichgewichtsgefühl, gelegentlich Übelkeit und selten Erbrechen. Falls das Problem über 1-2 Tage hinaus anhält, ziehen Sie bitte einen Arzt hinzu.
- Hinweis: Siehe „Warnungen und Vorsichtshinweise“ für weitere Informationen zur Produktsicherheit.

### *Zurücksetzen Ihres Modius™ Headsets*

Manchmal müssen Sie Ihr Headset zurücksetzen, etwa wenn Probleme auftreten oder wenn Sie es einer anderen Person geben wollen. Wenn Sie Ihr Headset zurücksetzen müssen, befolgen Sie die Anweisungen unten.

**HINWEIS:** Beim Zurücksetzen Ihres Headsets können Daten, die noch nicht mit der App synchronisiert wurden, verlorengehen. Die Anweisungen zum Zurücksetzen sollten nicht missbraucht werden, um die persönliche tägliche Benutzungsdauer zu erhöhen.

Das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel an einen USB-Ladeanschluss und das Headset anschließen.

Sicherstellen, dass die gelbe LED leuchtet (was anzeigt, dass das Headset geladen wird). Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste seitlich am Headset über 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie mehrere Pieptöne hören.

Jetzt ist das Gerät zurückgesetzt und Sie sollten Ihr Headset wie gewohnt verwenden können.

## Ausschalten Ihres Headsets

Halten Sie, während sich das Gerät verwendet wird oder sich im Standby-Modus befindet und benutzungsbereit ist, die Ein-/Ausschalttaste seitlich am Headset mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Sie hören einen tiefen Piepton, der anzeigt, dass das Headset sich ausgeschaltet hat.

Nach 10 Sekunden beginnt die App erneut nach Ihrem Headset zu suchen.

Laden Sie Ihr Headset nach jeder Verwendung, sodass es bereit für die nächste Sitzung ist.

## 4. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Mein Headset lässt sich einschalten, es kann aber keine Sitzung gestartet werden.	Das Headset ist ans Ladekabel angeschlossen.	Trennen Sie die Verbindung zum Kabel, bevor Sie eine Sitzung zu starten versuchen.
Mein Headset lässt sich nicht einschalten.	Das Headset ist nicht geladen.	Schließen Sie das Headset ans Ladekabel an.
	Das Headset befindet sich im Ruhemodus.	Schließen Sie das Headset an das Ladekabel an und versuchen Sie es einzuschalten.
Mein Headset funktioniert eine Zeit lang und schaltet sich dann aus.	Der Widerstand zwischen den Pads ist zu hoch.	Achten Sie darauf, vor dem Aufbringen der Gelpads die Alkohol-Reinigungstücher auf der Haut zu verwenden, die Pads korrekt hinter den Ohren zu platzieren und keine Haare zwischen den Pads und der Haut einzuklemmen.
	Die an die Elektroden angebrachten Pads sind abgetragen.	Tauschen Sie die Geldpads am Headset aus.
Mein Headset lässt sich nicht mit meinem Handy verbinden.	Auf Ihrem Handy ist Bluetooth nicht aktiviert.	Stellen Sie sicher, dass Bluetooth® auf Ihrem Handy aktiviert ist.
	Ihr Handy findet das Headset nicht.	Starten Sie die App auf Ihrem Handy neu.

<b>Während der Koppelung höre ich 3 kurze tiefe Pieptöne und die LED-Anzeige blinkt 3-mal blau.</b>	Beim Warten darauf, dass Sie die Koppelungsanfrage vom Handy auf dem Headset akzeptieren, ist die Zeit abgelaufen.	Schalten Sie das Headset aus und versuchen Sie erneut eine Koppelung gemäß den Anweisungen in „Koppeln Ihres Headsets mit Ihrem Handy“ herzustellen.
Ich finde die Benutzung des Headsets unangenehm.	Eventuell ist die Leistung des Geräts zu hoch.	Senken Sie die Geräteleistung mit der App, bis Sie ein leichtes Schaukeln spüren oder die Beschwerden abklingen.
Wenn ich mein Headset ans Ladekabel anschlieÙe, blinkt die LED-Anzeige gelb.	Beim Gerät liegt ein Ladefehler vor.	Versuchen Sie das Ladekabel mit einem anderen USB-Anschluss zu verbinden. Wenn sich Ihr Problem dadurch nicht lösen lässt, wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Die LED-Anzeige meines Headsets blinkt gelb und ich höre 3 kurze tiefe Pieptöne.	Der Akkuladestand des Headsets ist niedrig.	Laden Sie das Headset (siehe „Laden Ihres Headsets“).
Wenn ich versuche das Headset einzuschalten, höre ich 3 tiefe Pieptöne.	Der Akkuladestand des Headsets ist extrem niedrig.	Laden Sie das Headset (siehe „Laden Ihres Headsets“).

## 5. Pflege Ihres Modius™

### Headset

#### Ja

- Mit einem weichen Tuch sauber wischen.
- Das Headset nach der Benutzung ausschalten (oder Ihr Handy von Headset trennen).
- Das Headset nach jeder Benutzung vollständig laden, bevor es wieder ins Etui gelegt wird.

#### Nein

- Keine starken Scheuermittel oder aggressiven Reiniger verwenden.
- Das Headset nicht nass werden lassen.
- Nicht in Flüssigkeit eintauchen.
- Keiner übermäßigen Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Das Modius™ nicht so aufbewahren, dass das Stirnband eingedrückt oder gedehnt wird. Dies beeinträchtigt den Komfort und den sicheren Sitz auf Ihrem Kopf.

## Gelpads

### Ja

- Streichen Sie alle Haarsträhnen zurück, bevor Sie die Gelpads auf der gereinigten Haut anbringen, da sie ansonsten an den Pads festkleben können.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Haut sauber und frei von Make-up, Cremes und sonstigen Lotionen ist, bevor Sie die Pads verwenden.
- Reinigen Sie Ihre Hände, bevor Sie die Pads anfassen, und berühren Sie sie so wenig wie möglich mit den Fingern.
- Die Pads nach der Benutzung in einem geeigneten Behälter oder Mülleimer entsorgen.

### Nein

- Die Gelpads nicht gemeinsam mit anderen Personen verwenden. Die Pads sind für die Benutzung von nur einer Person vorgesehen.
- Ein Pad nicht länger als für die empfohlene Maximaldauer von 1 Stunde pro Sitzung verwenden.

## 6. Allgemeine Produktinformationen und technische Daten

### Technische Daten: Modius™ Headset

Modellname	ML600
Kanäle	Einzel
Stromversorgung	
Akkulebensdauer	Ca. 10 Stunden bei Stimulation auf Stufe 10 – Ca. 4 oder 5 Tage bei normaler Benutzung
Eingangsstecker	Voll isoliert, berührungssicher, Micro-USB
Gewicht	85 g
Größe	180x140x70mm
Informationen zum Stromversorgungseingang	
Micro Spannung	USB-Anschluss 4,75-5,25 V
Max. Strom	155 mA Gleichstrom
Maximale Ausgangsspannung	20 V
Maximaler Ausgangsstrom	600uA.
Bluetooth BLE - BGM113	
Betriebsfrequenzbereich	2,4 GHz für Bluetooth-Energiesparfunktion



Maximal übertragende HR-Leistung +3 dBm

---

Akku (Akku kann vom Benutzer nicht ausgetauscht werden)

Lithium-Polymer 3.7 V 165 mAh

---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C

Lagertemperatur: -20 bis 60 °C

Wasserdichte 0 m

---

Erwartete Gerätelebensdauer Die Garantiezeit des Geräts beträgt 1 Jahr, es hält aber oft länger.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf das Zubehör (Drähte, Pads und Reinigungstücher).

Die Lebensdauer der Drähte hängt stark von der Benutzung ab. Stets vorsichtig handhaben.

Die Elektrodenpads halten nur 1 Anwendung lang; die Haltbarkeitsdauer ist den Informationen des Herstellers zu entnehmen.

Haltbarkeitsdauer der Reinigungstücher siehe Verpackung des Herstellers.

Hinweis: Diese Herstellergarantie schränkt Ihre Rechte aus der gesetzlichen Gewährleistung nicht ein.

Haltbarkeitsdauer

Das Headset hat keine feste Haltbarkeitsdauer.

Haltbarkeitsdauer des Zubehörs (Pads, Drähte und Reinigungstücher) siehe Informationen des Herstellers.

---



Das Produkt wird hergestellt von Neurovalens, Ormeau Baths, 18 Ormeau Avenue, Belfast, BT2 8HS.

---



Das Gerät ist nicht wasserdicht und sollte vor Flüssigkeiten geschützt werden.

---



Siehe Zusatzsymbole und Gebrauchsanweisung für weitere Informationen.

---



Seriennummer auf dem Produktetikett zur Produktidentifizierung

---

### *Technische Daten: Verbrauchsmaterial (Elektrodenpads, Reinigungstücher)*

Nur das im Paket enthaltene oder von Neurovalens empfohlene Verbrauchsmaterial verwenden. Anweisungen des Herstellers zurate ziehen.

## Richtlinie zu Rückgabe und Garantie

Weitere Informationen finden Sie auf [www.modiushealth.com/conditionsofsale](http://www.modiushealth.com/conditionsofsale)

## 7. Hinweise zur Zulassung und Sicherheit

### Konformitätserklärung - Modellname: ML600

Hiermit erklärt Neurovalens, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen von Richtlinien, der Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit und der Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf [www.modiushealth.com/compliance](http://www.modiushealth.com/compliance).



Enthält FCC ID: QOQBGM113

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Voraussetzungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und
2. Dieses Gerät muss alle erhaltenen Interferenzen annehmen, darunter Interferenzen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.



Modius™ entspricht den geltenden grundlegenden Voraussetzungen der Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU.

FDA Die FDA stuft Modius™ als „allgemeines Wellnessgerät“ ein und setzt deshalb keine regulatorischen Anforderungen durch.

Zertifiziert über Siliconlabs

FCC ID:

IC ID:

FCC-15C

QOQBGM113

5123A-BGM113

### Sicherheitserklärung

Dieses Gerät wurde auf seine Erfüllung der elektromagnetischen Kompatibilitäts- und Sicherheitsbescheinigung gemäß den Vorgaben der folgenden EN-Normen geprüft: EN301489-3, EN301489-17 und EN 60950-1

Modius™ wurde getestet und entspricht anerkannten Normen für die Immunität gegen Hochfrequenzinterferenzen über den Betriebsfrequenzbereich von 2,4 GHz.

Hinweis: Modius™ ist ausschließlich zur Unterstützung von Erwachsenen über 18 Jahren bei einem angestrebten Gewichtsverlust oder einer angestrebten Gewichtskontrolle indiziert.

## *Sicherheitswarnungen und Vorsichtshinweise - Headset*

### **Vorsicht:**

Lesen Sie die mitgelieferten Informationen und Anweisungen, bevor Sie das Modius™ Headset verwenden.

Die Elektroden-Gelpads gemäß den Anweisungen nur auf den Warzenfortsätzen hinter den Ohren platzieren. Nicht auf der Brust oder an anderen Stellen am Kopf oder Hals platzieren.

Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind, Reflexepilepsie haben, die durch vestibuläre Stimulation ausgelöst wird, oder einen Herzschrittmacher haben.

Falls unerwartete Reaktionen auftreten, sollte die Verwendung von Modius™ sofort abgebrochen werden.

### **Ja**

Die Pads gemäß den obigen Anweisungen nur auf die Warzenfortsätze, den harten, knöchigen Bereich hinter den Ohren, auflegen. Nicht auf der Brust oder an anderen Stellen am Kopf oder Hals platzieren. Siehe „So tragen Sie Ihr Headset“.

Nur im Sitzen oder Liegen verwenden.

Dieses Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Unter 18-Jährige sollten dieses Produkt nicht verwenden.

### **Nein**

Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind, Reflexepilepsie haben, die durch vestibuläre Stimulation ausgelöst wird, oder einen implantierten Herzschrittmacher, Herz-Defibrillator oder ein Neurostimulationsgerät haben. Hinweis: Modius™ stimuliert das Gleichgewichtsorgan des Gehirns. Dies dürfte zwar die meisten Epileptiker nicht beeinträchtigen, es könnte jedoch bei Menschen mit vestibulärer Reflexepilepsie einen Anfall auslösen. Im Zweifelsfall sollten potenzielle Benutzer mit Epilepsie zuerst ihren Hausarzt zurate ziehen.

Nicht verwenden, während Sie mobil sind (sich bewegen), da das Gerät Ihren Gleichgewichtssinn beeinträchtigen kann.

Beim Konsum von Alkohol, beim Fahren oder beim Bedienen von Maschinen jeglicher Art nicht verwenden.

Nicht in feuchten Umgebungen verwenden oder das Headset in Wasser tauchen.

Die Gelpads nicht gemeinsam mit anderen Personen verwenden. Sie sind für die Benutzung von nur einer Person vorgesehen.

Ein Pad nicht länger als für die empfohlene Maximaldauer von 1 Stunde pro Sitzung verwenden.

Das Pad sollte nach jeder Verwendung entsorgt werden. Die längere oder wiederholte Verwendung eines Pads kann dessen Wirksamkeit verringern oder Hautreizungen verursachen.

Die Pads nicht auf verletzte oder gereizte Haut auflegen.

Die Pads nach der Benutzung vorsichtig von der Haut entfernen. Die Pads in einem geeigneten Behälter oder Mülleimer entsorgen.

Die Akkus nicht entfernen. Sie können vom Benutzer nicht ausgetauscht werden.

### **Hinweis:**

Das Gerät ist weder ein medizinisches Gerät noch ist ein Ersatz für einen gesunden Lebensstil oder für professionelle medizinische Versorgung.

Falls unerwartete Reaktionen auftreten, sollte die Verwendung von Modius™ sofort abgebrochen werden. Wenn Sie sich während einer Sitzung unwohl fühlen, halten Sie die Sitzung an und verringern Sie die Intensität, bevor Sie fortfahren. Mögliche Gefahren oder Nebenwirkungen sind unter anderem: Hautreizungen, Unbehagen durch die Stimulation, gestörtes Gleichgewichtsgefühl, gelegentlich Übelkeit und selten Erbrechen. Falls das Problem über 1-2 Tage hinaus anhält, ziehen Sie bitte einen Arzt hinzu.

Die empfohlene Verwendungsdauer beträgt 45 Minuten bis maximal 1 Stunde pro Tag. Modius™ stoppt die Stimulation automatisch, wenn Sie es länger als 1 Stunde pro Tag verwenden (oder eigentlich pro Zeitraum von 16 Stunden, damit Sie nicht „ausgesperrt“ werden, wenn Sie Modius™ einmal ein paar Stunden früher benutzen wollen).

Die Anweisungen zum Zurücksetzen sollten nicht missbraucht werden, um die persönliche tägliche Benutzungsdauer zu erhöhen.

Lesen und befolgen Sie diese Warnhinweise und Anweisungen. Bewahren Sie dieses Dokument zusammen mit Ihrem Headset auf.

### *Vorsichtshinweise zum eingebauten Akku*

Ihr Modius™ Headset hat einen eingebauten Akku, der vom Benutzer nicht ausgetauscht werden kann. Manipulieren Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht es zu öffnen, da dadurch die Garantie erlischt und Ihre Sicherheit gefährdet werden kann.

Laden Sie das Headset gemäß dieser Gebrauchsanweisung mit einer Stromquelle auf, die von einem anerkannten Prüflaborator zertifiziert ist.

### *Informationen zur Entsorgung und zum Recycling*



Eine der Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2002/96/EG ist, dass alles, was elektronisch ist, als elektronischer Abfall behandelt werden soll und nicht weggeworfen werden darf. Um Sie an diese Richtlinie zu erinnern, werden alle betroffenen Produkte jetzt mit dem Bild einer durchgestrichenen Mülltonne markiert, wie oben dargestellt. Am Ende des Produktlebenszyklus werfen Sie dieses Produkt oder die Akkus nicht in den normalen Hausmüll, sondern bringen Sie es zu einer Sammelstelle für das Recycling elektronischer Geräte. Eine falsche Entsorgung kann dazu führen, dass sich schädliche Giftstoffe in der Luft, im Wasser und im Boden anreichern, die für die menschliche Gesundheit schädlich sein können.

Hinweis: Die Pads und Reinigungstücher in einem geeigneten Behälter oder Mülleimer entsorgen.

### *Lizenzinformationen*



Modius™ nutzt Bluetooth