



An- und ausschalten des SenzeBands

Drücken Sie den Power-Knopf einmal, um das SenzeBand anzuschalten. Warten Sie, bis das grüne Licht an der Seite zweimal blinkt. Danach zeigt Ihnen ein durchgehendes grünes Licht, dass das SenzeBand angeschaltet ist. Drücken Sie zum Ausschalten des SenzeBands einmal den Knopf, während das grüne Licht leuchtet. Das SenzeBand blinkt zweimal rot bevor es ausgeht.

Aufladen des Neeuro SenzeBand

Schalten Sie das SenzeBand aus und stecken Sie das im Lieferumfang enthaltene Micro-USB Ladekabel in den entsprechenden Anschluss am SenzeBand. Ein rotes Licht zeigt Ihnen, dass das SenzeBand lädt und ein grünes Licht zeigt an, dass es voll aufgeladen ist.

Einrichtung des SenzeBand

Schritt 1: Laden Sie die Neeuro App im Apple App Store oder im Google Play Store herunter.

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth an Ihrem Smartphone bzw. Tablet aktiviert ist. Bei Android und iOS können Sie dies unter Einstellungen > Bluetooth tun.

Schritt 3: Schalten Sie das SenzeBand an; ein durchgehendes grünes Licht zeigt Ihnen an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Ein rotes Licht bedeutet, dass der Akku leer ist und das Gerät geladen werden muss.


Schritt 4: Öffnen Sie die Neeuro App und erstellen Sie einen Account bzw. loggen Sie sich ein. Gehen Sie in der Anwendung auf Settings > Device > Add Device und folgen Sie den Anweisungen um Ihr SenzeBand zu verbinden.

Schritt 5: Achten Sie darauf, dass Ihre Stirn und die Sensoren des SenzeBands keine Verunreinigungen aufweisen. Nutzen Sie ggf. nichtalkoholische Reinigungstücher.

Schritt 6: Platzieren Sie das SenzeBand auf Ihrer Stirn, achten Sie darauf, dass die Sensoren ca. 2 bis 3 Zentimeter oberhalb Ihrer Augenbrauen aufliegen. Wenn Sie Sensoren zu weit oben an der Stirn anliegen, kann das zu unzuverlässigen Messergebnissen und einer instabilen Verbindung führen


2

Schritt 7: Passen Sie die Referenzsensoren hinter den Ohren so an, dass sie sicher an den Ohren anliegen.

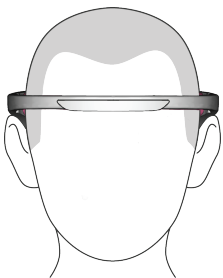


Frontansicht

Achten Sie darauf, dass das Band des SenzeBand ca. 2 bis 3 Zentimeter über Ihren Augenbrauen sitzt.

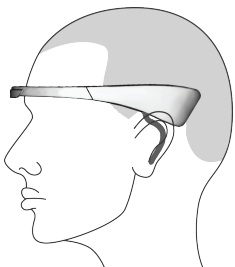

Seitenansicht

Achten Sie darauf, dass die beiden Referenzsensoren vollständig und sicher hinten an Ihrem Ohr anliegen.

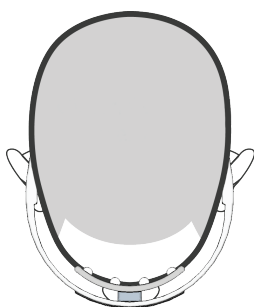

Draufsicht

Achten Sie darauf, dass die vier Sensoren an der Stirn fest auf der Haut aufliegen.

3

Schritt 8: Um festzustellen, ob Ihr SenzeBand korrekt verbunden ist, gehen Sie in der Neeuro App auf Settings > Status und passen Sie den Sitz des SenzeBands so lange an, bis alle vier Anzeigen grün leuchten. Nur dann können Sie sicher sein, dass die Sensoren des SenzeBands eine gute Verbindung haben und Ihre Gehirnwellen korrekt auslesen können.

Viel Vergnügen mit Ihrem Neeuro SenzeBand.

4

Sicherheit und Konformität

Benutzen Sie das SenzeBand nicht unter feuchten oder regnerischen Bedingungen. Falls Ihr SenzeBand nass wird, schalten Sie es aus und entfernen Sie alle Kabel. Warten Sie bis das SenzeBand vollständig getrocknet ist, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Versuchen Sie nicht das SenzeBand mit Hilfe externer Hitzequellen, wie Föns, zu trocknen. Setzen Sie es nicht extremer Hitze oder Kälte aus. Bei weiteren Fragen können Sie uns kontaktieren: support@neuro.com.

Batteriesicherheit

Der Akku des SenzeBand sollte nicht durch einen Drittanbieter repariert oder ausgetauscht werden. Laden Sie das SenzeBand ausschließlich mit einem Micro-USB Kabel auf, wie dem das dem Produkt beiliegt.

FCC Hinweis

Jede Veränderung oder Bearbeitung die nicht ausdrücklich durch die für die Compliance zuständige Partei autorisiert ist, hebt alle Ansprüche aus der Nutzung des Geräts auf. Dieses Gerät entspricht den Vorgaben aus Abschnitt 15 der FCC Bestimmungen. Die Nutzung erfolgt unter den folgenden Bedingungen: (1) Das Gerät verursacht keine schädliche Interferenz und (2) das Gerät verkräftet eingehende Interferenzen, inklusiver solcher, die unerwünschte Effekte hervorrufen.

FCC Statement zu Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC Grenzwerten für Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung.

Dieses Übertragungsgerät sollte nicht in der Nähe oder zusammen mit einer anderen Sendeeinrichtung verwendet werden.

WEEE Konformität

Bitte entsorgen Sie das SenzeBand nicht im normalen Hausabfall. Geben Sie das SenzeBand stattdessen bei ihrem Verkäufer oder an einer speziellen Sammelstelle für Elektroschrott ab. Dadurch können Sie einen Beitrag dazu leisten, dass natürliche Ressourcen geschont werden und dass das SenzeBand auf umweltschonende Art und Weise recycelt wird.

TITAN Commerce Continental Services GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 13
35440 Linden
Germany

info@titan-commerce.com

Neeuro Pte Ltd (Reg: 201302274H)

79 Ayer Rajah Crescent, #02-19
LaunchPad @ One-North
Singapore 139955

support@neuro.com