

1: QardioCore Anpassung

Wenn Ihnen Ihr Arzt verschrieben hat, QardioCore 24 Stunden lang zu tragen, tragen Sie es immer und lassen Sie es nicht nass werden. Wenn Ihnen Ihr Arzt das Tragen von QardioCore für mehr als 24 Stunden verschrieben hat, müssen Sie das Gerät täglich für eine Stunde entfernen und die Batterie.



1a.

Wickeln Sie den Gurt um die Brust und verbinden Sie ihn.

1b.

Stellen Sie sicher, dass das Band straff genug ist und alle Elektroden die Haut berühren, aber nicht zu straff, damit es nicht unangenehm ist.

1c.

Platzieren Sie QardioCore unterhalb des Brustbeins. Stellen Sie die Länge des Gurtes so ein, dass zwei Finger bequem darunter passen.

Bitte beachten:


- Der Bereich um die Brust sollte sauber sein, ohne Flecken oder andere Arten von Hautreizungen auf der Brust.
- Wenn Sie den Gurt an die linke Seite (oder die rechte Seite im umgekehrten Modus) von QardioCore anschließen, werden Sie ein grünes Licht einmal blinken sehen, um anzuzeigen, dass QardioCore eingeschaltet ist.

Informationen für Frauen:

Wir empfehlen, dass weibliche Patienten den QardioCore kopfüber und unterhalb des Brustbeins tragen.

2: QardioCore mit dem iPhone verbinden

3: Wie Sie Symptome melden

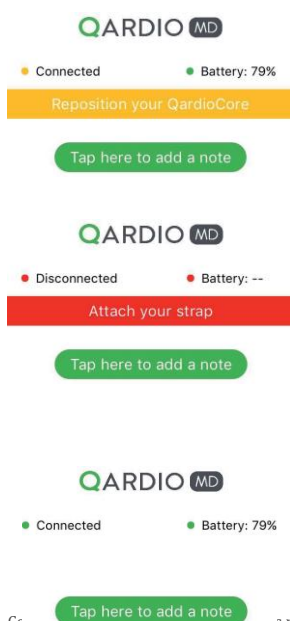

2a.

Wenn der QardioCore Balken gelb angezeigt wird, positionieren Sie bitte Ihren QardioCore neu.

2b.


Wenn der QardioCore-Balken rot angezeigt wird, schließen Sie bitte Ihren Gurt richtig an.

2c.

Wenn QardioCore angeschlossen ist, erscheint ein grüner Punkt mit "Verbunden" auf der linken Seite.

Die Meldung Ihrer Symptome ist einfach und wird Ihren Arzt unterstützen. Öffnen Sie die Qardio-App und tippen Sie jedes Mal, wenn ein Symptom - wie z.B. Herzklopfen, Brustschmerzen usw. - empfunden wird, auf die grüne Schaltfläche "Tippen Sie hier, um eine Notiz hinzuzufügen"..

Wählen Sie aus der Liste der allgemeinen Symptome oder geben Sie eine benutzerdefinierte Symptombeschreibung ein.

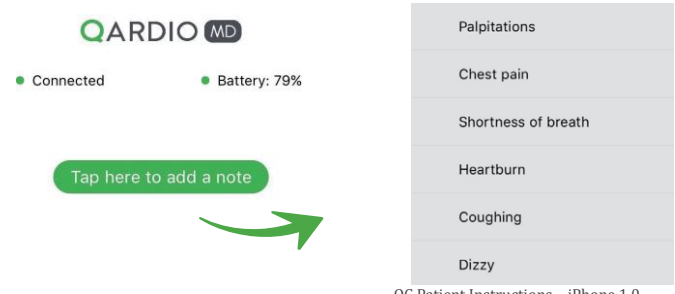

4: Reinigung von QardioCore

Reinigen Sie den QardioCore mit einem Desinfektionstuch (bis zu 60% Alkohol).

Reinigungsprodukte und Scheuermittel sollten NICHT auf Ihrem QardioCore verwendet werden.

Druckluft oder die Hitze eines Haarföhns können das Gerät beschädigen.



5: Aufladen des QardioCore und iPhones

Laden Sie den QardioCore-Monitor jeden Tag 1 Stunde lang mit dem Telefon in Bluetooth-Reichweite auf. Sie können dies tun, wenn Sie es zum Duschen abnehmen

Ein blinkendes grünes Licht alle zwei Sekunden zeigt an, dass QardioCore geladen wird. Ein dauerhaftes grünes Licht zeigt an, dass QardioCore vollständig geladen ist.



Stellen Sie sicher, dass sowohl QardioCore als auch das iPhone morgens zu 100% aufgeladen sind.

4: Häufig gestellte Fragen

Kann ich QardioCore während meiner normalen Aktivitäten tragen?

Ja, Sie dürfen QardioCore während des Trainings und im Alltag tragen und benutzen. Setzen Sie QardioCore keinen Temperaturen über 104F / 40C aus.

Muss ich den Monitor im Bett tragen?

Ja, der Monitor sollte während der gesamten Überwachungsperiode ständig getragen werden.

Wann werde ich die Ergebnisse erhalten?

Ihre EKG-Daten werden an Ihr Telefon gesendet, das die Informationen aufzeichnet und an Ihren Arzt per Fernzugriff sendet. Ihr Arzt wird sich mit den Ergebnissen bei Ihnen melden.

Was sollte ich mit QardioCore tragen?

Sie sollten Ihre normale Kleidung tragen. Für Frauen empfehlen wir, QardioCore verkehrt herum zu tragen und sicherzustellen, dass das Gerät unterhalb der BH-Linie getragen wird.

Kann ich damit baden /duschen gehen?

Wir empfehlen nicht, den QardioCore unter der Dusche oder in der Badewanne zu tragen. Bitte entfernen Sie den QardioCore für Dusche / Bad und nutzen Sie diese Zeit, um das Gerät aufzuladen.

5: Warnungen

Nicht in Kombination mit einem externen Herzdefibrillator oder hochfrequenten chirurgischen Geräten oder in der Nähe von starken Magnetfeldern oder Geräten wie z.B. MRI verwenden.

Nicht verwenden bei bekannten Hautallergien gegen eines der Materialien, die in der "Liste der Materialien mit Patientenkontakt" auf der Gebrauchsanweisung angegeben sind.

Lassen Sie QardioCore nicht fallen und wenden Sie keine starken Stöße und Vibrationen auf QardioCore an, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

QARDIOCORE SOLLTE IM NOTFALL NICHT VERWENDET WERDEN.

KONTAKTIEREN SIE IM NOTFALL SOFORT DIE ÖRTLICHEN RETTUNGSDIENSTE.